

# NUTRINOVATE ANDNINGSSKYDD



10-PACK

By MaskMakers

Filtrerande halvmask för skydd mot COVID-19.



Filtrering av partiklar >98%.



Made in  
Sweden


## Bruksanvisning

PPE-R/02.075 Version 2

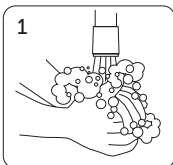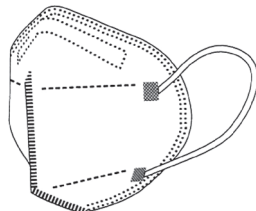


1

Tvätta händerna noga med tvål och vatten eller med handsprit (min 60% alkohol).

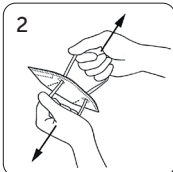


2

Tag maskens öronöglor och öppna den genom att dra isär öglorna.

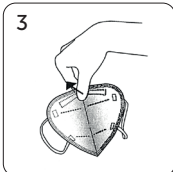


3

För bättre passform, tryck på näsbygels mittveck.

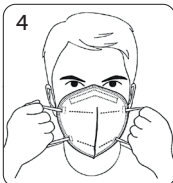

4

Håll masken mot ansiktet. Anpassa masken till haka och näsa – se till att masken täcker ordentligt.

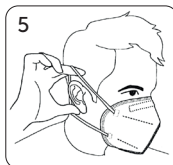

5

Dra på öronöglorna runt respektive öra.




6

Använd bägge händerna för att forma näsbryggans metallclip till näsrygg och kinder.



7

Kontrollera att masken sitter tätt. Du kan behöva justera för att optimera funktionen. Detta är viktigt för maskens funktion.

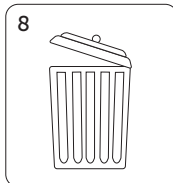

8

Efter användning, ta av masken genom att bara hålla i öronöglorna, kasta i soptunna med lock, tvätta händerna noga.

Ref.: Kommissionens rekommendationer (EU) 2020/403, Förordning (EU) 2016/425).



7 350092 900423 >

Hur du tar av dig masken på ett säkert sätt:

- Dra av masken med hjälp av öronöglorna - tag aldrig i masken.
- Släng masken i sopkärl med lock.
- Var noga med att inte komma i kontakt med ögon, näsa eller mun när du tar av masken.
- Tvätta händerna med tvål och vatten omedelbart efter att du slängt masken.

Nutrinnovate AB förbehåller sig rätten att genomföra förändringar i bruksanvisningen. För senaste version av bruksanvisningen, besök vår hemsida. För ytterligare information, var god kontakta vår kundtjänst i Sverige.


## Distributör

Nutrinnovate AB  
Lahällsvägen 46  
183 30 Täby  
www.nutrinnovate.se  
+46 8 33 40 60  
info@nutrinnovate.se

## Förklaring till pictogram



Se tillverkarens information.

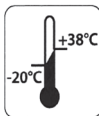

Rekomenderad lagringstemperatur.



Utgångsdatum.



Lagras torr - ej över 80% fuktighet.

Denna filtrerande halvmask är tillverkad för att skydda mot COVID-19. I enlighet med Världshälsoorganisationens (WHOs) rekommendationer, har denna mask skyddsfaktor FFP2 definierat i EN 149:2001 + A1: 2009, vid denna specifika användning. Denna filtrerande skall endast användas för denna indikation, masken skall därför inte användas som skydd mot någon annan indikation.



MaskMakers Sweden AB  
Förrådsvägen 23  
741 30 KNIVSTA

2020-11-23 ©MaskMakers Sweden AB

## Varning

- Ansiktsbehandling (t.ex. skägg/skäggstubb) påverkar maskens möjlighet att sluta tätt och därmed funktion.
- Använd inte masken i syrefattiga miljöer.
- Använd inte masken i explosiva miljöer.
- Varning – den här produkten är inte brandsäker och skall inte användas i miljöer med öppen eld.
- Om masken är skadad, smutsig, fuktig eller kontaminerad skall den slängas.
- Om du får svårt att andas, känner yrsel eller annat obehag skall du ta dig till en säker miljö, ta av masken och slänga den.
- Masken skall bara användas en gång.

## Tillämpning och begränsningar

Dessa masker är endast avsedda för skydd mot

COVID-19 och skall inte användas för annat ändamål som exempelvis skydd mot damm, aerosoler el dyl.

Denna PPE är avsedd att skydda mot COVID-19.

## Underhåll

Försök aldrig att rengöra eller desinficera masken.

Använd aldrig masken mer än en gång.

## Bedömning av överensstämmelse

EU-typ verifiering genomförd av ackrediterad FORCE Certifications A/S

Park Alle 345, 2605 Brøndby, Danmark  
Certifikat No. 0200-PPE-08909

## Harmoniserad standard

PPE-R/02.075 version 2

### Viktigt:

Nutrinnovate AB tar inget ansvar för något som, vare sig direkt eller indirekt (inklusive, utan begränsning till, sjukdom, skada, business och/eller goodwill), uppstått genom hänvisning till den informationen som här tillhandahålls av Nutrinnovate AB. Varje användare har ett eget ansvar att bedöma tillämpligheten av produkten och den avsedda användningen.